



LactatePro™ 2

Kurzbedienungsanleitung



Desinfektion des Ohrenlappchens/Fingers.
Öffnen und Einsetzen des Teststreifens in den Teststreifenschlitz des LactatePro Gerätes.



Punktion gem. Bedienungsanleitung des Stechers.
Erster Tropfen wegwischen. Halten des Streifenendes an den Blutstropfen – der Streifen zieht automatisch die notwendige Blutmenge ein. Ein Signal meldet den Beginn der Messung. Vorsicht, Blut nicht auf Streifen tropfen.



Nach 15 Sekunden erscheint das Resultat.
„lo“ wird angezeigt bei einer Laktatmenge <0.5 mmol/l
„hi“ wird angezeigt bei einer Laktatmenge >25.0 mmol/l



Mögliche Fehlerquellen


- Vermischung von Schweiß und Blut
- Berühren des Streifens mit schmutzigen oder feuchten Händen
- Ungenügendes Einstecken des Streifens
- Zu kalte/warme Aussentemperatur






LactatePro™ 2


Mesure du lactate - Guide Rapide

1 

Désinfection du lobe de l'oreille/doigt.
Ouvrir un nouvel étui de bandelettes-tests, insérer une bandelette dans la fente prévue sur l'appareil LactatePro.
Avec une lancette, faire une piqûre nette à l'endroit idéal du lobe de l'oreille ou du doigt.

2 

Essuyer les premières gouttes de sang.
Apposer le bout de la bandelette sur la goutte de sang - la bandelette aspire automatiquement la quantité de sang nécessaire.
Un signal annonce le début de la mesure.
Attention, ne pas faire tomber de goutte de sang sur la bandelette.

3 

Le résultat de la mesure de lactate apparaît au bout de 15 secondes.
„lo” s’affiche si la mesure de lactate est en dessous de 0.5 mmol/l
„hi” pour une mesure de lactate supérieure à 25.0 mmol/l



Sources d'erreurs possibles

- Mélange de sang et de sueur
- Toucher la bandelette avec des mains grasses
- La bandelette n'a pas été suffisamment enfoncée
- Température extérieure trop haute/trop basse