




Wie wird Unistik® 3 verwendet?

1. Drehen

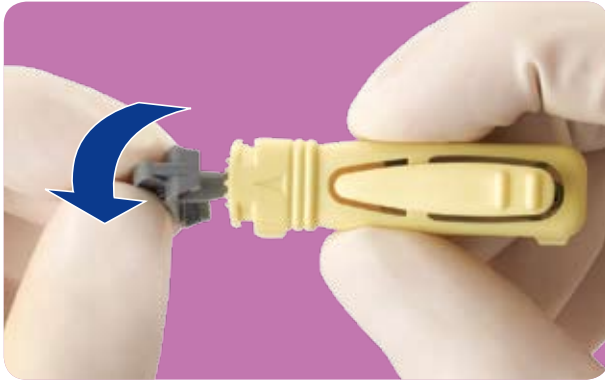

Halten Sie Unistik 3 fest und drehen Sie den Lanzettenverschluss ab, bis er vom Gerät getrennt ist (nicht ziehen, nur drehen). Entsorgen Sie den Verschluss in einem dafür geeigneten Behälter.

2. Probenentnahme

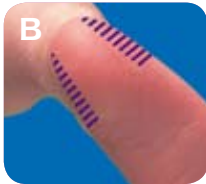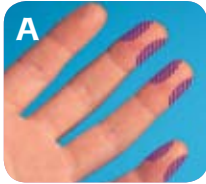

Wählen Sie einen Entnahmeort entsprechend der schattierten Bereiche der Bilder A und B. Drücken Sie die Unistik 3-Stechhilfe gegen den Entnahmeort und betätigen Sie den Auslöseknopf.

Massieren Sie im Bedarfsfall den Entnahmeort. Achten Sie aber darauf, an der Stelle selbst nicht zu viel Druck auszuüben.

Die Einweg-Nadel zieht sich unmittelbar nach der Penetration zurück und ermöglicht so die sichere direkte Entsorgung. Verwenden Sie einen geeigneten Behälter für scharfe Gegenstände.